



COMFORT **SPLINT**



PFLEGEHINWEISE FÜR IHRE SCHIENE

Hanseatic Dental Manufaktur Nord GmbH

Bergstraße 8 - 21465 Reinbek

T 040 - 727 962 8

F 040 - 728 120 55

info@hdm-reinbek.de

www.hdm-reinbek.de

 /Hanseatic Dental Manufaktur Nord GmbH



HANSEATIC DENTAL
MANUFAKTUR NORD

PFLEGEHINWEISE

FÜR IHRE SCHIENE



TÄGLICHE REINIGUNG

- ▶ Reinigen Sie Ihre Schiene möglichst vor und nach jedem Tragen
- ▶ Entfernen Sie Speichel und Rückstände mit warmem Wasser (nicht heißer als ca. 45°C)
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung Ihre Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel) oder Geschirrspülmittel
- ▶ Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden



HINWEISE

- ▶ Einfaches Einsetzen dank Memory-Effekt. Die Schiene passt sich perfekt an Ihre Zähne an und ermöglicht Ihnen ein einfaches und zeitsparendes Einsetzen
- ▶ Vor jedem Tragen für mindestens 20 Sekunden in ca. 45°C warmes Wasser legen (nicht heißer)
- ▶ **TAUCHEN SIE** die Schiene **NICHT** in Wasser, das heißer ist als ca. 45°C, da sich die Schiene sonst verziehen könnte



COMFORT SPLINT

AUFBEWAHRUNG

- ▶ Bewahren Sie Ihre Schiene in der mitgelieferten Schienenbox auf
- ▶ Bitte achten Sie darauf, dass die Schiene trocken ist und bei Raumtemperatur in der Schienenbox aufbewahrt wird